

Dispositivo medico

SPRAY PROTECT Plus®



IGIENE SENZA BAGNARE



IGIENIZZANTE OGGETTI E SUPERFICI

Spray Protect plus® è uno spray secco specificatamente studiato per igienizzare superfici ed oggetti d'uso comune come telefono cellulare, tastiere, mouse, chiavi, maniglie, interni d'automobili, scarpe, vestiti, poltroncine, ecc. Non macchia ed è totalmente compatibile con tutti i tipi di materiali e componenti elettronici.

Il prodotto può essere utilizzato a scopo di prevenzione e in ambito sanitario in quanto contiene componenti che risultano efficaci per l'inattivazione di batteri e virus (SARS CoV-2) neutralizzando la loro capacità infettiva.

Modalità d'uso:

Agitare e spruzzare per 3 secondi direttamente sugli oggetti o superfici da trattare da una distanza di circa 25/30 cm.

Lasciare agire almeno 5 minuti.

Formati disponibili: 400 ml

SPRAY PROTECT Plus® contiene:

- Sali quaternari d'ammonio
- Profumo
- Propellente ed eccipienti



CE Dispositivo Medico

bioapp
diosbb

- non bagna
- non danneggia parti elettriche
- nessun residuo
- senza risciaquo
- protezione immediata
- fresco profumo



SPRAY PROTECT plus®

Igienizzante oggetti e superfici

Componenti ad azione
BATTERICIDA e VIRUCIDA

- Il principio attivo è a base di un innovativo blend di sali quaternari d'ammonio senza cloro.
- Si caratterizza oltre che per la rapida efficacia documentata, per praticità, semplicità d'utilizzo e sicurezza, infatti il prodotto è compatibile con tutti i tipi di materiali e componenti elettronici e una volta erogato non è tossico e non è infiammabile.
- Rapida azione contro batteri e virus.
- Elimina gli odori causati dalla decomposizione batterica.
- L'erogazione avviene tramite nebulizzazione secca consentendo alla formulazione di igienizzare anche i punti meno accessibili e difficili da raggiungere con altri mezzi.
- Non contiene CFC ritenuti dannosi per lo strato d'ozono.
- Dispositivo Medico di Classe I.
- Formati disponibili: 400 ml

Immagine
prodotto



Modalità d'uso: Agitare e spruzzare per 3 secondi direttamente sugli oggetti o superfici da trattare da una distanza di circa 25/30 cm. Lasciare agire almeno 5 minuti. In caso d'uso intensivo aerare il locale prima di soggiornarvi. Leggere attentamente le raccomandazioni.

ESTRATTO TEST BATTERICIDA - Relazione tecnica n°: RT 200562 del 17/06/2020 - a disposizione report integrale

LAB-CONTROL S.r.l. è un Laboratorio di Prova accreditato ACCREDIA, Ente Nazionale di Accreditamento Laboratori con il n. 0228 del 1999, in accordo alle Norme ISO/IEC 17025:2005 e UNI EN ISO 9001:2008

RELAZIONE TECNICA: VERIFICA DELL'EFFICACIA BATTERICIDA DEL PRODOTTO SPRAY IGIENIZZANTE: **SPRAY PROTECT Plus** (Secondo indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e delle norme UNI EN ISO 18593:2018, UNI EN ISO 4833-1:2013 e UNI EN 1276:2019)

"Il prodotto SPRAY PROTECT Plus della ditta HARVEN s.a.s. ha dimostrato un'ottima attività battericida, nella formulazione fornita per la prova, a seguito dell'applicazione continuativa per 3 secondi dello spray, ad una distanza dalla superficie di 20 ÷ 25 cm e per periodi di tempo di attesa, dopo l'applicazione, fino a 4 minuti. Le riduzioni vitali per tali periodi sono rispettivamente dell'ordine di 3,5 ÷ 4,0 Log10."

ESTRATTO TEST VIRUCIDA - RAPPORTO DI PROVA N° 5047892 DEL 15/07/2020 - a disposizione report integrale

REGIONE VENETO - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA U.O.C. Microbiologia e Virologia -
Via A. Giustiniani 1 - 35128 PADOVA - Tel. +039 049 8213051-8830-7914 Fax. +039 049 8213054
(SGQ UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato n.5871 da Certiquality)

"Il prodotto Spray Protect Plus-26, erogato per 3 secondi ad una distanza di 25 cm, ha dimostrato un'attività pari al 99.9% nei confronti di SARS-CoV-2, dopo 10 minuti di contatto."

Raccomandazioni:

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare i vapori / gli aerosol. Proteggere gli occhi / il viso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Risciacquare, dopo l'utilizzo, oggetti e superfici che verranno a contatto con alimenti. Utilizzare solo su oggetti e superfici. Il prodotto una volta erogato non è tossico e non è infiammabile. Contiene: PROPAN-2-OLO; Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004; Superiore a 30% idrocarburi alifatici; altro; profumi.



CE LOT 20216
S.P.p. B26



bioapp
piosbb

BioApp sas di M. Zenaga & C.

www.bioapp.it • info@bioapp.it • bioappes@pec.it
Viale del Lavoro, 12/b 45100 Rovigo (RO) TEL./FAX 0425.1547882
C.F./P.I. 04703860280 e Reg. Imprese 04703860280