

NDP Air Total+ Green

Disinfettante aereo
per superfici

- Ideale per disinfezioni finale.
- Efficace contro: Batteri, Micobatteri, Funghi ed enveloped virus.
- Contiene gas propellente ecologico.



**Vesismin
Health**

Preventing infections

NDP Air Total+ Green

Applicazioni

- Sale operatorie.
- Studi medici ed odontoiatrici.
- Laboratori e camere bianche.
- Studi veterinari.
- Ambulanze.
- Mezzi di trasporto.
- Condotti di aria condizionata.

Efficacia

- **Batteri:** (EN1276, EN13697, EN13727) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*.
- **Funghi:** (EN1650, EN13697, EN13624) *Aspergillus brasiliensis (niger)*, *Candida albicans*.
- **Enveloped virus:** (EN14476) contra H1N1, virus gripal surrogado para virus lipofilicos (Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, VIH...).
- **Micobatteri:** (EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.

Composizione

- Cloruro di didecil dimetil ammonio.
- Fenossietanolo.
- Aldeide cinnamica.
- Propellente ed eccipienti.

Formati

- Bombola da 50ml per la disinfezione di <math><40\text{m}^3</math>.
- Bombola da 300ml per la disinfezione di <math><150\text{m}^3</math>.



CE
0476

NDP Air Total+ Green è un prodotto per la disinfezione per nebulizzazione delle superfici ed apparecchiature Mediche. La valvola "one-shot" nebulizza il contenuto in una singola applicazione e permette al prodotto di raggiungere anche, gli angoli più difficilmente accessibili.

Si caratterizza per un **ampio spettro biocida** ed agisce in tempi brevi su batteri, funghi, micobatteri e virus.

Non contiene gas infiammabili, ne ingredienti tossici. Ciò permette l'utilizzo in luoghi dove non si possono applicare altri prodotti. È totalmente compatibile con tutti i tipi di materiali e componenti elettroniche.

Dispositivo Medico di Classe IIa.

NDP Air Total+ Green contiene gas ecologico 

Ampio spettro biocida

Istruzioni d'uso:

Si può visitare il sito web per guardare i video del prodotto.



1 Posizionare il flacone su una superficie piana e rimuovere il sigillo.



2 Premere e girare la valvola di scarico totale, consentendo al prodotto di disperdersi nell'ambiente.



3 Il prodotto si vaporizza su un'area di:
- 40 m³ in un minuto (formato 50 ml)
- 150 m³ in tre minuti (formato 300 ml)
Una volta che l'ambiente è impregnato, lasciare agire.



4 Tempo minimo di applicazione 1 ora (se non sono diversamente previsto da protocolli interni). Ventilare l'ambiente prima di rientrare nella zona disinfettata. Applicare in assenza di persone.

Disponibili le strip di valutazione sulla diffusione dell'NDP Air Total + Green

- Al contatto con il disinfettante la strip cambia colore indicando l'effettiva disinfezione della superficie.
- Evita che non vengano disinfettate le aree meno accessibili.
- Rapida e pratica visualizzazione.